

www.hoggi.de
HOGGI®

Made in Germany
by HOGGI 

SWINGBO vTi

Aktiver Kinder- & Jugendrollstuhl mit 45° Sitzkantelung.



Konstruiert und handgefertigt in Deutschland.

SWINGBO[®] VTi



SWINGBO[®] VTi

Abgebildete Ausstattung:

SWINGBO[®] VTi Fahrgestell. Verlängerter Schiebebügel (abklappbar u. winkelverstellbar). Doppelkippschutz. Antriebsräder **HOGGI** light mit Luft-Bereifung. Lenkräder: PU-Rad mit Design-Alufelge. Fußbrett aus Aluminium. Sitzblech mit konturiertem Sitzkissen. Rückenblech und Rückenkissen in Muldenform. Kopfstütze „Standard“ mit Polster. Armlehnen mit Kantenausgleich. Rahmenfarbe: „gelbgrün“.

SWINGBO vTi

Die Weiterentwicklung des innovativen Versorgungskonzeptes.

Mit dem **SWINGBO® vTi** wurde das innovative Versorgungskonzept konsequent weiter entwickelt.

Die neue Konstruktion der Sitzkantelung ermöglicht ein komfortables Kanteln im Schwerpunkt. Der Sitzwinkelverstellbereich geht von -5° bis $+45^\circ$.

Der Fahrgestellrahmen ist als Abduktionsvariante designed und garantiert jederzeit eine abduzierte Sitzpositionierung.

Abduktionsrahmen. Sitzkantelung von -5° bis $+45^\circ$.



Abduktionsrahmen.



45° Sitzkantelung.

Modernes, kompaktes und sportliches Design. Modulares und variables Baukastensystem.

Das Design überzeugt durch ein modernes, sportliches und kompaktes Erscheinungsbild. Umfassende Verstellmöglichkeiten sowie umfangreiche Zubehöre ermöglichen eine optimale und individuelle Versorgung. Dank des modularen Baukastenprinzips sind Fahrgestell, Sitzeinheit und Kniewinkelanlage separat erhältlich. Das ermöglicht eine große Vielfalt an Versorgungskonzepten.

SWINGBO[®] VTi



Elegant und homogen. Leicht und kompakt für den Transport.



Variabel und mitwachsend.



Extrem kompakt.

Extrem kompaktes faltmaß. Leichtes Eigengewicht.

Zum Transport oder für die Autofahrt erreicht dein **SWINGBO[®] VTi** mit nur 3 Handgriffen ein extrem kompaktes faltmaß. Das Aufrichten zum Gebrauch ist genauso leicht. Grundausgestattet (SB 28) kann sich der **SWINGBO[®] VTi** mit nur 15 kg Gewicht selbst als mitwachsender, aktiver und kantelbarer Kinder- und Jugendrollstuhl mit reinen Aktiv-Rollstühlen ohne Mitwachsvermögen messen.

SWINGBO vTi

Sitzkantelung und Rückenneigung.

Je nach dem Bedürfnis des Kindes ermöglicht der **SWINGBO® vTi** einen sanften Wechsel zwischen der aktiven und der passiven Position. Ob Sitzkantelung oder Rückenwinkelverstellung - beides ist leicht zu bedienen und bietet diverse Winkelpositionen für die perfekte und individuelle Versorgung.

Sitzkantelung von -5° bis $+45^\circ$.

Die Sitzkantelung bietet eine Sitzwinkelverstellung von -5° bis $+45^\circ$ (in vierzehn 4° Schritten).

Rückenneigung von 80° bis 120° .

Die Rückenneigung ist von 80° bis 120° (in fünf 10° Schritten) verstellbar.


Die perfekte Versorgung und Position - in jeder Situation.




Sitzkantelung.



Rückenneigung.

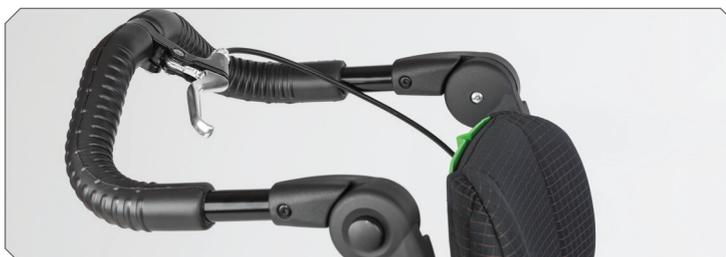

Auslösung Sitzkantelung am Schiebebügel.

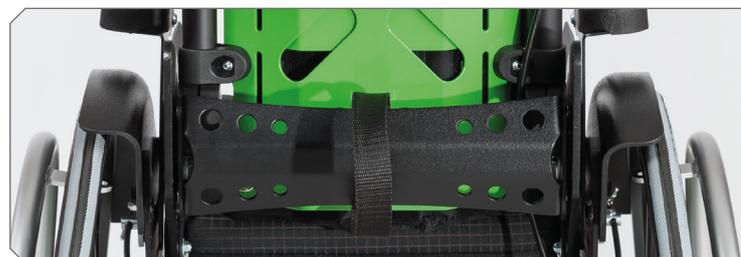

Auslösung an der Rückentraverse.


SWINGBO VTi

Viele Optionen. Sonderbaulösungen.

Gestalte deinen **SWINGBO® VTi** speziell nach deinen gesundheitlichen Bedürfnissen. Alles ist möglich. **HOGGI** bietet dir eine Riesenauswahl an Optionen für deine perfekte und individuelle Versorgung. Im Bestellformular findest Du alle aktuellen Zubehöre.

Tip: Im Sonderbau konstruieren wir speziell nach deinen Wünschen angepasste Lösungen. Sprich uns an - wir helfen gerne!

Innovative Zubehöre. Praktisch und komfortabel.

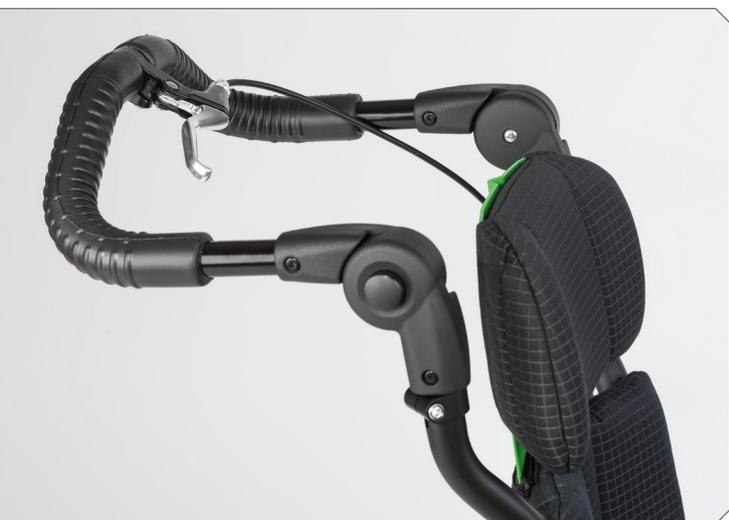

Höhenverstellbarer, verlängerter Schiebebügel.



Kniehebelbremse.



Fußbrettvariante Aluminium.



Armlehnen mit Kantenausgleich. Konturiertes Sitzkissen.

SWINGBO vTi

Mitwachsen in der Sitztiefe und in der Rückenhöhe.

Das Mitwachsvermögen der Sitztiefe beträgt 8 cm und in der Rückenhöhe sind 9 cm möglich.

Einfache Aktivgradverstellung.

Die Sitzaufnahme des SWINGBO® vTi ist in Längsrichtung verschiebbar gelagert und ermöglicht eine einfache sowie stufenlose Einstellung des Aktivgrades.

Enormes Mitwachsvermögen. Einfache Aktivgradverstellung.



Mitwachsvermögen.



Zentrale Bedienelemente.



Verstellmöglichkeiten.

SWINGBO[®] VTi XL



SWINGBO[®] VTi XL

Abgebildete Ausstattung:

SWINGBO[®] VTi XL Fahrgestell. Verlängerter Schiebebügel (abklappbar u. winkelverstellbar). Doppelkippschutz. Antriebsräder **HOGGI** light mit Luft-Bereifung. Lenkräder: PU-Rad mit Design-Alufelge. Fußbrett aus Kunststoff. Sitzblech mit konturiertem Sitzkissen. Rückenblech und Rückenkissen in Muldenform. Kopfstützenhalter „Universal“ mit Hinterhauptpolster. Armlehnen mit Kantenausgleich. Rahmenfarbe: „feuerrot“.

SWINGBO[®] VTi XL

SWINGBO[®] VTi als XL Version.

Der aktive Kinder- und Jugendrollstuhl mit 45° Sitzkantelung ist auch als **XL**-Version erhältlich.

Abduzierter aber fest verschweißter Rahmen. Bis zu 75 kg Zuladung.

Der Fahrgestellrahmen ist als Abduktionsvariante designed, ist jedoch im Gegensatz zum „kleinen VTi“ fest verschweißt und erlaubt eine hohe Zuladung bis 75 kg. Technisch bietet der **SWINGBO[®] VTi XL** exakt dieselben komfortablen Features wie der **SWINGBO[®] VTi**.

Abduktionsrahmen. Sitzkantelung von -5° bis +45°.



Kompaktes Faltmaß.



45° Sitzkantelung.

Modernes, kompaktes und sportliches Design. Modulares und variables Baukastensystem.

Das Design überzeugt durch ein modernes, sportliches und kompaktes Erscheinungsbild. Umfassende Verstellmöglichkeiten sowie umfangreiche Zubehöre ermöglichen eine optimale und individuelle Versorgung. Dank des modularen Baukastenprinzips sind Fahrgestell, Sitzeinheit und Kniewinkelanlage separat erhältlich. Das ermöglicht eine große Vielfalt an Versorgungskonzepten.

SWINGBO VTi

Technische Daten

Sitzbreite	24 cm	26 cm	28 cm	30 cm	32 cm	34 cm	36 cm
Sitztiefe	24-30 cm	24-32 cm	26-34 cm	28-36 cm	30-38 cm	32-40 cm	34-42 cm
Sitzhöhe	37-47 cm bei allen Sitzbreiten						
Sitzwinkel	-5° bis +45° bei allen Sitzbreiten						
Rückenhöhe							
Rücken winkel- und höhenverstellbar	33-42 cm	35-44 cm	37-46 cm	39-48 cm	41-50 cm	43-52 cm	45-54 cm
Schiebebügel/-griffe abklappbar	36-44 cm	37-45 cm	38-48 cm	39-49 cm	40-50 cm	42-54 cm	43-55 cm
Schiebebügel abklappbar u. winkelverstellbar	36-44 cm	37-45 cm	38-48 cm	39-49 cm	40-50 cm	42-54 cm	43-55 cm
Rückenwinkel							
Rücken winkel- und höhenverstellbar	75° bis 115° oder von 80° bis 120° (in 10° Schritten)						
Schiebebügel/-griffe abklappbar	85° bis 105° (in 5° Schritten)						
Schiebebügel abklappbar u. winkelverstellbar	80° bis 120° (in 10° Schritten)						
Unterschenkellänge	16-37 cm						
Fußbrettwinkel	-10° bis +10°						
Antriebsraddurchmesser	20“, 22“, 24“						
Lenkraddurchmesser	4“, 5“, 5,5“						
Radsturz	3°, 6°, 9°						
Maximale Zuladung	60 kg						
Hilfsmittelnummer	18.50.03.2011						

Sicherheitsaspekt: Erfolgreich crashgetestet.

SWINGBO® VTi wurde nach ISO 7176-19 erfolgreich crashgetestet.
SWINGBO® VTi ist für den Gebrauch im BTW (Behindertentransportwagen) geeignet.

SWINGBO VTi XL

Technische Daten

Sitzbreite	36 cm	40 cm	44 cm
Sitztiefe	34-46 cm	38-50 cm	38-50 cm
Sitzhöhe	41-51 cm	41-51 cm	41-51 cm
Sitzwinkel	-5° bis +45°	-5° bis +45°	-5° bis +45°
Rückenhöhe			
Rücken winkel- und höhenverstellbar	45-54 cm	50-59 cm	54-63 cm
Schiebebügel/-griffe abklappbar	43-55 cm	45-57 cm	48-60 cm
Schiebebügel abklappbar und winkelverstellbar	43-55 cm	45-57 cm	48-60 cm
Rückenwinkel			
Rücken winkel- und höhenverstellbar	75° bis 115° oder von 80° bis 120° (in 10° Schritten)		
Schiebebügel/-griffe abklappbar	85° bis 105° (in 5° Schritten)		
Schiebebügel abklappbar und winkelverstellbar	80° bis 120° (in 10° Schritten)		
Unterschenkellänge	20-41 cm	20-41 cm	20-41 cm
Fußbrettwinkel	-10° bis +10°	-10° bis +10°	-10° bis +10°
Antriebsraddurchmesser	22", 24"	22", 24"	22", 24"
Lenkraddurchmesser	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"
Radsturz	3°, 6°, 9°	3°, 6°, 9°	3°, 6°, 9°
Maximale Zuladung	75 kg	75 kg	75 kg
Hilfsmittelnummer	18.50.03.2015	18.50.03.2015	18.50.03.2015

Sicherheitsaspekt: Erfolgreich crashgetestet.

SWINGBO® VTi XL wurde nach ISO 7176-19 erfolgreich crashgetestet.

SWINGBO® VTi XL ist für den Gebrauch im BTW (Behindertentransportwagen) geeignet.

SWINGBO vTi

HOGGI

Partnerschaft für mobile Kinder.

HOGGI GmbH

 Eulerstraße 27
D-56235 Ransbach-Baumbach

 Telefon: (+49) 2623 / 92 499-0
Telefax: (+49) 2623 / 92 499-99

 info@hoggi.de

www.hoggi.de